

平成 19 年 8 月 13 日作成

中性の酵素系洗浄剤です。2種類のタンパク質分解酵素が、広範囲の温度、PHで作用します。

浸漬洗浄、超音波洗浄器、自動洗浄器の洗浄剤として、ゴム、プラスチック、ステンレススチール、カーボンスチール、軟性金属の洗浄にお使いいただけます。

低発泡性界面活性剤、防錆成分配合。

【使用方法】

一度使用した洗浄液は廃棄し、洗浄ごとに新しい液に換えて下さい。

○ 浸漬

本品約 30mL を約 3.8L の温水（約 20～40℃）に加えます。器具の付着物が溶けてはがれるまで、1分以上浸漬します。落ちにくい場合は見た目がきれいになるまで長く浸漬します。必要に応じて器具用のブラシで汚れを落とします。汚れがきれいに落ちたことを確認の後、器具を温水でよくすすぎます。タオルなどで水気を拭き取り乾かします。その後適切な方法で消毒又は滅菌して下さい。

- ・器具類は使用后直ちに洗浄液に漬けて下さい。
- ・管腔やチャンネル隅々まで洗浄液に接触するように完全に漬けて下さい。

○ 内視鏡用洗浄器

本品約 15mL を約 3.8L の水に加えます。または、本容器を自動注入ユニットに接続します。

○ 超音波洗浄器

本品約 30mL を約 3.8L の水（約 20～40℃の温水推奨）に加えます。2分以上浸漬します。

○ 自動洗浄滅菌器（ウォッシャーSterilizer）

本容器を自動注入ユニットに接続します。

【注 意】

本品には滅菌・消毒効果はありません。

容器に記載の使用期限までに使用して下さい。

血液や体液に触れた器具等を扱う際は、保護めがね、グローブ等の防御具を身につけて下さい。

皮膚に付いた場合：石鹸と水で洗って下さい。

目に入った場合：直ちに流水で 15 分以上洗い流し、刺激が続く場合は医療機関を受診して下さい。一時的に目が赤くなる場合があります。

飲み込んだ場合：吐いてはいけません。大量の水を飲んで下さい。医療機関を受診して下さい。

【保管・廃棄】

冷所に保管して下さい。

子供の手の届かない場所に保管して下さい。

使用後の洗浄液は、感染性廃棄物として廃棄して下さい。

空容器は再利用せず、プラスチックゴミとして廃棄して下さい。

輸入販売元：フィード株式会社

〒220-6119

横浜市西区みなとみらい 2-3-3 クイーンズタワー

お問い合わせ専用(カスタマ・サービスデスク)

電話：0120-004-502 FAX：0120-004-506

ご注文は

電話：0120-004-503 FAX：0120-004-506