

# カリエステイン

4101-05

2007年8月13日発行

## 〈概要〉

- 用途 : 本品は水溶性染色液で、カリエス組織、感染象牙質を染色します。
- 製品の特長 : カリエス組織、感染象牙質を染色することによって、脱灰組織と再石灰化組織の境界線がはっきり示され、カリエス除去時に最大限、健康歯牙組織を残すためのガイドとなります。

化学、物理学的データ :

主成分 : プロピレングリコール、法定色素赤色 106 号

性状 : 真珠光沢のある赤色液体、沸点 188°C、比重 1.04、揮発性 1.2~22%(容積)、水溶性

### ⚠ 注意

1. 内服するものでないため、飲まないで下さい。
2. 軟組織、皮膚と目に触れないようにして下さい。万が一目に入った場合には、直ちに清潔な水で洗浄し、必要に応じて、医師に相談して下さい。皮膚に接触した場合には、石鹸と水で洗浄して下さい。
- 3 使用する前には、必ず〈使用方法〉をよくお読みの上、ご使用下さい。

## 〈使用方法〉

1. 通法により大体の窩洞形成を行います(ラバーダムの使用をお勧めします)。
2. 窩洞を洗浄乾燥します。
3. 本品をスポンジに取り、窩洞底と壁に塗布し、10 秒間置きます。
4. 水洗します。この時点で、カリエスになった象牙質は染色されるが、正常又は再石灰化した象牙質は染色されません。
5. 手用インスツルメント又は低速回転器具を用いて、染色された歯質を除去します。
6. 必要によって、繰り返し染色します。
7. 窩洞形成を完成し、通法により修復します。ただし、浅くて小さなカリエスの場合は、窩洞形成の前に染色することもできます。

### ⚠ 注意

1. 交叉感染を防ぐために、各窩洞に新しいスポンジを使用して下さい。
2. 染色された歯質を除去するとき、低速の回転器具の使用をお勧めします。

## 〈保存方法〉

1. 低温(25°C以下)かつ乾燥した、風通しの良い場所で保管して下さい。
2. 使用后、直ちにキャップを締めて下さい。

製造元 : Parkell (アメリカ)

輸入販売元 : フィード株式会社  
〒220-6119  
横浜市西区みなとみらい2-3-3  
クイーンズタワー

この製品に関するお問い合わせは

お問い合わせ専用(カスタマ・サービスデスク)

電話 : 0120-004-502

FAX : 0120-004-506

ご注文は

電話 : 0120-004-503

FAX : 0120-004-506